

Consignes générales de sécurité

La simulation de limitations relatives à l'âge, la maladie ou le handicap entraîne inévitablement aussi des risques, comme par exemple un risque accru d'accidents.

La simulation de restrictions doit donc toujours se faire avec une prudence particulière.

Nos produits ne peuvent pas être utilisés par des personnes

- avec des capacités déjà limitées, par exemple, en raison de l'âge, d'une maladie ou d'un handicap
- présentant un risque accru, comme par exemple les femmes enceintes, les épileptiques, les personnes malades neurologiquement ou psychiquement, les personnes présentant un danger d'accident vasculaire cérébral ou de maladie cardiaque
- avec des maladies aiguës, telles que les infections et les maladies de la peau

Une attention particulière est nécessaire chez les enfants et les adolescents, ainsi que chez les personnes ayant une déficience cognitive ou des problèmes de comportement.

L'utilisation de nos produits ne peut avoir lieu que dans un environnement sûr et uniquement sous la supervision d'une personne compétente.

Le superviseur est responsable de l'utilisation. Celui-ci devra faire en sorte que les points mentionnés ci-dessus soient respectés.

En plus de ces consignes de sécurité générales, les consignes de sécurité des instructions respectives doivent être respectées.

Produkt + Projekt



Wolfgang Moll

Simulateur du Vieillissement

GERT crée l'expérience de vieillesse



simulateur-du-vieillissement.com

Consignes générales de sécurité

La simulation de limitations relatives à l'âge, la maladie ou le handicap entraîne inévitablement aussi des risques, comme par exemple un risque accru d'accidents.

La simulation de restrictions doit donc toujours se faire avec une prudence particulière.

Nos produits ne peuvent pas être utilisés par des personnes

- avec des capacités déjà limitées, par exemple, en raison de l'âge, d'une maladie ou d'un handicap
- présentant un risque accru, comme par exemple les femmes enceintes, les épileptiques, les personnes malades neurologiquement ou psychiquement, les personnes présentant un danger d'accident vasculaire cérébral ou de maladie cardiaque
- avec des maladies aiguës, telles que les infections et les maladies de la peau

Une attention particulière est nécessaire chez les enfants et les adolescents, ainsi que chez les personnes ayant une déficience cognitive ou des problèmes de comportement.

L'utilisation de nos produits ne peut avoir lieu que dans un environnement sûr et uniquement sous la supervision d'une personne compétente.

Le superviseur est responsable de l'utilisation. Celui-ci devra faire en sorte que les points mentionnés ci-dessus soient respectés.

En plus de ces consignes de sécurité générales, les consignes de sécurité des instructions respectives doivent être respectées.

Produkt + Projekt



Wolfgang Moll

Instructions d'utilisation du Simulateur du Vieillissement GERT

Il est facile de mettre la combinaison tout en étant assis avec l'assistance d'une personne debout dans l'ordre suivant :

Le cas échéant, mettez d'abord les surchaussures disponibles en accessoire.

1. Les poids de cheville



Les poids peuvent être ajustés.

2. Les genouillères



Enroulez-les serré autour du genou, la jambe tendue.

3. Le gilet de poids



Avant de le mettre, vous pouvez ajuster et répartir les poids individuellement.

Instructions d'utilisation du Simulateur du Vieillissement GERT

7. Collier cervical



Le collier cervical doit être attaché à l'arrière sans être trop serré pour limiter le mouvement de la tête sans le restreindre complètement.

8. Les lunettes



Les lunettes peuvent être portées sur les lunettes de vue.

9. Le casque auditif ou les bouchons d'oreilles jetables



Les bouchons d'oreilles jetables peuvent être mis en place par la personne elle-même avant la mise en place des gants (4).

Instructions d'utilisation du Simulateur du Vieillissement GERT

4. Les gants



Nous fournissons les gants dans les tailles S, M et L. Choisissez la bonne taille, ils doivent être bien ajustés de façon moulante, l'agilité des mains doit être réduite. Afin de diminuer les sensations tactiles, mettez en-dessous des gants jetables ou des gants en tissus.

5. Les poids des poignets



Fixez-les sur les bandages des gants.

6. Les coudières



Enroulez-les serré autour du coude, le bras tendu.

Instructions d'utilisation des Lunettes de simulation



Dégénérescence maculaire



Cataracte



Glaucome



Décollement unilatérale
de la rétine



Rétinopathie diabétique



Rétinite pigmentaire

Enlevez les lunettes de correction. Portez les lunettes uniquement dans un environnement sûr et familier accompagné d'une tierce personne. Ne les portez pas à l'extérieur dans la circulation ou pour l'utilisation de machines !

Pour des raisons de sécurité et pour éviter des accidents on peut appréhender son environnement également dans les zones noircies des verres. Il subsiste néanmoins un risque d'accident. Pour la sécurité du porteur nous avons équipé les lunettes de verres incassables.

Les branches des lunettes sont ajustables en longueur. Les lunettes doivent être portées ajustées au visage de l'utilisateur. Pour effectuer les mouvements des yeux l'utilisateur ne doit pas bouger ses pupilles mais la tête.

Les lunettes peuvent être nettoyées seulement à sec avec un chiffon doux de nettoyage pour lunettes. Ne jamais mettre d'eau ou d'agents nettoyants en contact avec les verres car le film pourrait être endommagé.

Contact

Produkt + Projekt
Wolfgang Moll
Andreasweg 7
89168 Niederstotzingen
ALLEMAGNE

Tél. : +49 (0)7325 - 18 0 81-50

Fax : +49 (0)7325 - 18 0 81-55

info@produktundprojekt.de
www.produktundprojekt.de

Contact francophone

Tél. : +49 (0)7325 - 18 0 81-51
(disponible en semaine 8h30 à 16h30)

info@simulateur-du-vieillissement.com
www.simulateur-du-vieillissement.com

Produkt + Projekt
■■■■■
Wolfgang Moll

Instructions d'utilisation du Simulateur du Vieillissement GERT

Consignes de sécurité

Afin d'éviter une altération physique due à la charge supplémentaire de la combinaison, nous déconseillons son port aux personnes frêles, ayant des problèmes de santé ou des restrictions physiques. Chaque participant doit être interrogé sur son état de santé. L'utilisation ne doit être faite que sous surveillance compétente.

Les poids doivent être ajustés pour les personnes frêles. Le port du simulateur du vieillissement est déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes ou aux personnes âgées.

Nettoyage

Tous les composants sont lavables à la main à l'eau tiède avec un détergent doux.

Avant de laver des lunettes, le verre doit être retiré. Le verre ne doit pas être rincé ou immergé dans l'eau, sinon l'eau pénètre par le trou d'air dans le verre double et ne peut pas être éliminé complètement.

Retirer et réinstaller le verre

Autant que possible, ne touchez pas le verre avec des doigts non protégés (par exemple, utilisez des gants jetables).

Poussez le bord élastique avec une pression douce vers l'extérieur.

Lors de la réinstallation commencez par la découpe pour le nez et poussez le bord sur le verre jusqu'à l'enclenchement. Ensuite, travaillez sur les côtés. Enfin, poussez le bord supérieur sur le verre. Pressez fermement le bord tout autour.

Contact

Produkt + Projekt
Wolfgang Moll
Andreasweg 7
89168 Niederstotzingen
ALLEMAGNE

Tél. : +49 (0)7325 - 18 0 81-50

Fax : +49 (0)7325 - 18 0 81-55

info@produktundprojekt.de
www.produktundprojekt.de

Contact francophone

Tél. : +49 (0)7325 - 18 0 81-51
(disponible en semaine 8h30 à 12h30)

info@simulateur-du-vieillissement.com
www.simulateur-du-vieillissement.com

Produkt + Projekt

Wolfgang Moll