

TECHNIQUE DE POSE DU MASQUE DE SOINS A ELASTIQUES



+

2

1 Déplier le masque, le tenir par le haut(baguette) et passer les doigts dans les élastiques (côté bleu légèrement brillant à l'extérieur)

2 La face absorbante (côté blanc) est à appliquer sur la bouche et le nez

3 Positionner le masque sur le nez et la bouche en incluant le menton

4 Accrocher le masque: passer les élastiques derrière les oreilles

5 Modeler la barrette et ajuster la au contour du nez avec vos deux index

6 Assurer l'étanchéité du masque: le nez, la bouche et le menton doivent être recouverts

+



Une fois en place :
Ne plus manipuler le masque jusqu'à son retrait
Si non manipulé, **durée d'utilisation du masque = 3 heures**

Au retrait :

